

ACCU-CHEK Active GLUCOSE paski testowe * 50 nowy



Cena: 38,16 zł

Opis produktu

ACCU-CHEK ACTIVE test paskowy x 50 sztuk

Paski testowe do samodzielnego wykonywania pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej, najczęściej z opuszki palca*. Zawierają reagent, który nie interferuje z innymi cukrami prostymi, także mogą być wykorzystywane przez osoby w trakcie terapii zawierającej maltozę oraz poddawane dializie otrzewnowej (z zastosowaniem iksodekstryny).

Zasada działania glukometru polega na rejestrowaniu prądu elektrycznego, wytwarzanego podczas reakcji glukozy z reagentem zawartym w pasku.

W skład opakowania wchodzi:

- testy paskowe - 50 sztuk;
- skala barw;
- tabela stężeń dla roztworów kontrolnych;
- klucz aktywacyjny;
- ulotka informacyjna.

*Wśród alternatywnych miejsc poboru krwi wymienia się: dłoń, przedramię, ramię lub udo.

Accu-Chek Active - wskazania

Diagnostyka poziomu glukozy we krwi pełnej w warunkach domowych.

Accu-Chek Active - przeciwwskazania

Brak.

Accu-Chek Active - sposób użycia

Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Przed badaniem pomasować palec w celu poprawy jego ukrwienia. Po umyciu i osuszeniu skóry, pobrać krew za pomocą nakłuwacza. Kroplę umieścić w wyznaczonym polu na pasku testowym, po czym odczytać wynik, który pojawi się na wyświetlaczu glukometru. W razie wątpliwości powtórzyć pomiar. Po zakończeniu badania szczelnie zamknąć fiolkę.

Pomiar należy przeprowadzać:

- na czczo lub co najmniej 2 godziny po posiłku;
- przynajmniej 2 godziny po przyjęciu ostatniej dawki insuliny;
- co najmniej 2 godziny po zakończeniu wzmożonego wysiłku fizycznego.

Testy należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia fiolki.

Accu-Chek Active - dodatkowe informacje

Czynniki mogące zaburzać wynik pomiaru:

- paracetamol, witamina C, kwas moczowy, leki wpływające na krzepliwość krwi i glikolizę;
- zmiany w gospodarce wodno-elektrolitowej;
- cukrzycowa kwasica ketonowa;
- niedociśnienie;
- choroba tętnic.