

ACCU-CHEK PERFORMA GLUKOMETR KIT FC



Cena: 101,19 zł

Opis produktu

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa umożliwia szybki i łatwy pomiar poziomu glukozy we krwi. Aparat ma fabrycznie ustawioną datę i godzinę i jest od razu gotowy do użycia. Współpracuje z testami paskowymi Accu-Chek Performa. Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc lekarzowi w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Zalety i funkcjonalność

- Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
- Precyzja pomiaru zgodna z normami EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013.
- Niewielka próbka krwi o objętości zaledwie 0,6µl.
- Wynik w ciągu 5 sekund.
- Bez kodowania.
- Glukometr od razu gotowy do użycia.
- Możliwość ustawienia do 4 spersonalizowanych przypomnień o pomiarze.
- Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru, dzięki czemu jest

energooszczędne.

Dodatkowa specyfikacja

Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehydrogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).

Czas pomiaru:

Okolo 5 sekund.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR)

Wymiary:

94 x 52 x 21 mm

Masa:

59 g z baterią

Wyświetlacz:

Duży ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonkami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

Jedna 3-woltowa bateria pastylkowa typ 2032.

Żywotność baterii:

Okolo 2000 pomiarów.

Samoczynne wyłączanie:

Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności.

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–3094 m n.p.m.

Wielkość próbki krwi:

0,6 µl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl; 0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włosniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Pobranie próbki:

System kapilary zasysającej krew.

Zakres hematokrytu:

10–65%

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).

W zestawie :

- glukometr Accu-Chek Performa
- baterie
- nakłuwacz SoftClix
- lancety
- testy paskowe 10szt.(Data ważności 30.11.2021)
- etui

- instrukcja obsługi- wydrukowana