

CANPOL OSŁONKI PIERSI EASYSTART rozmiar M/L 18/603 2sztuki



Cena: 10,46 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	CANPOL SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Oslonki na piersi wykonane z miękkiego i delikatnego silikonu umożliwiają bezbolesne karmienie. Doskonale chronią obolałe i popękane brodawki oraz przyspieszają gojenie ran. Górna nieco węższa krawędź osłonek sprawia, że dziecko jedząc, może przytulić się do piersi matki, poczuć zapach jej skóry i ciepło. Silikon nie posiada zapachu ani smaku, dlatego nie wpływa na smak pokarmu. Specjalnie etui do sterylizacji ułatwia higienę i utrzymanie osłonek w czystości. Umożliwia szybką, 2-minutową dezynfekcję w kuchenke mikrofalowej. W opakowaniu 2 sztuki.

Instrukcja sterylizacji w etui:

1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem etui dokładnie umyj w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłucz.
2. Wlej 25 ml przegotowanej wody do podstawy.
Uwaga! Dodanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui. Dodanie zbyt dużej ilości wody może spowodować niewłaściwą dezynfekcję.
3. Włóż nakładki do etui.
4. Szczelnie nałóż pokrywkę.
5. Zamknięte etui umieść w kuchenke mikrofalowej.
6. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000 W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty. Nie przekraczaj czasu dezynfekcji.

Podczas pracy etui musi stać na równej powierzchni. Przed wyjęciem etui z mikrofalówki zawsze poczekaj co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i otwierania. Wylej pozostałą wodę z etui przez dedykowany otwór, opłucz ją i osusz. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące. Odczekaj 15 min przed kolejną dezynfekcją, aby etui całkowicie ostygło.

Galeria

