

# HYDROSIL leczenie ran żel hydrokoloidalny 75g

Cena: 100,00 zł



## Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SEQUOIA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

## Hydrosil

Spray 75g

### Żel hydrokoloidalny przyspieszający naturalne gojenie

Hydrosil to wyrób medyczny o unikalnych hydrożelowych właściwościach, który zapewnia optymalne warunki leczenia ran o różnej etiologii.

Hydrosil działa jak inteligentny opatrunek: nawilża suche brzegi rany i tworzy odpowiednie środowisko gojenia ran.

### Dlaczego Hydrosil?

§ znacząco przyspiesza naturalny proces gojenia ran

§ zmniejsza ryzyko zakażeń i powikłań

- § reguluje prawidłowy poziom wilgotności rany
- § zapewnia bezbolesną zmianę opatrunku
- § zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów

#### **Zastosowanie:**

Do stosowania w leczeniu ran takich jak:

- § niewielkie rany
- § niewielkie oparzenia (zaczerwienienie i/lub pęcherze)
- § otarcia
- § owrzodzenia powierzchniowe

#### **Sposób użycia:**

Dokładnie umyj ręce przed i po opatrywaniu rany:

- § oczyść ranę
- § zdezynfekuj leczony obszar (w tym obszar wokół rany)
- § delikatnie osusz ranę i obszar wokół rany
- § nałóż Hydrosil na ranę, unikając kontaktu rany z dłońmi i końcówką pojemnika
- § w razie potrzeby załóż oddychający opatrunek (bandaż lub plaster).

#### **Oparzenia:**

**Hydrosil** może być stosowany na powierzchniowe oparzenia, którym zwykle towarzyszą obrzęki, zaczerwienienie i pęcherzyki.

W przypadku oparzeń, jak najszybciej należy schładzać miejsce oparzenia pod bieżącą, letnią wodą przez około 15-20 minut.

Następnie zastosuj Hydrosil postępując według instrukcji powyżej „Sposób użycia”.

#### **Środki ostrożności:**

Preparat Hydrosil nie powoduje znanych działań niepożądanych, takich jak podrażnienie lub nadwrażliwość.

Nie należy stosować preparatu w okolicach oczu, powiek ani błon śluzowych.

Hydrosil nie jest zalecany:

- § w przypadku dużych, obszernych lub głębokich ran

§ w przypadku silnie zakażonych ran

§ w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

W razie braku poprawy lub w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych reakcji (np. podrażnienie, uczulenie) skonsultuj się z lekarzem. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Do użytku zewnętrznego.

**Skład:** Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, środek konserwujący: cytrynian srebra.