

OCTENISEPT żel 20ml hydrożel do nawlżenia, ochrony ran i oparzeń



Cena: 100,00 zł

Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Octenisept żel to wyrób medyczny do stosowania na ostre zranienia skóry, takie jak otarcia, rany cięte i lekkie oparzenia, np. oparzenie słoneczne.

Stwarza wilgotne warunki niezbędne do prawidłowego gojenia się rany. Ponadto chroni ranę przed infekcją.

Dzięki swojej wyjątkowej formule Octenisept® żel tworzy barierę ochronną przed bakteriami, dzięki czemu chroni przed infekcjami i stanami zapalnymi.

Wspiera i przyspiesza naturalne gojenie ran. Ponadto żel ogranicza powstawanie blizn podczas gojenia rany. Dzięki efektowi chłodzącemu Octenisept® żel łagodzi ostry świąd.

Octenisept żel jest bezbarwny i nie powoduje pieczenia podczas nakładania.

Wskazania

Żel zalecany jest do stosowania na ostre zranienia skóry (np. otarcia, skaleczenia, rany cięte), a także lekkie oparzenia I i II stopnia (np. oparzenia słoneczne).

Skład:

Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl.

Sposób użycia:

1. Zdezynfekuj ranę.
2. Nanieś cienką warstwę żelu.
3. W razie konieczności całość zabezpiecz za pomocą plastra lub bandaża.

Żel należy aplikować 1-2 razy dziennie, aż do całkowitego zagojenia.

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Dodatkowe informacje:

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Bez kontroli lekarza nie należy stosować wyrobu dłużej niż 2 tygodnie.

Produkt niejadalny - nie stosować na rany przewlekłe.

Nie stosować na chrząstkę szklaną, w uszach ani w nosie.

Nie stosować do infuzji ani wstrzyknięć.

Unikać kontaktu z oczami.

Nie spożywać.

Uwagi i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozu.

Żel należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie stosować razem z mydłami do oczyszczania ran, maściami, olejkami i enzymami, gdyż może to zmniejszać efektywność działania żelu.

Nie stosować w połączeniu z PVP-jodem, gdyż może to zmniejszyć efektywność działania PVP-jodu i prowadzić do powstania przebarwień.

Stosowanie razem z natłuszczonymi opatrunkami może prowadzić do ich przyschnięcia i utrudnionego zdejmowania opatrunku.

Podmiot odpowiedzialny

Schulke Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa