

# OPATRUNEK ATRAUMAN AG 10cm\*20cm\*1 szt

Cena: 28,58 zł

## Opis produktu

### Właściwości:

Atrauman Ag to nieprzywierająca warstwa kontaktowa. Materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem elementarnym. Jest impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Miękki, cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany. Powierzchnia materiału nośnego i maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go atraumatycznie zmieniać. Atrauman Ag działa jak opatrunek barierowy z maścią zawierający srebro. Maść chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji. Nie zawiera substancji czynnych ani parafiny.

### Zastosowanie:

- Do leczenia ran przewlekłych, takich jak owrzodzenie żyłne podudzi, owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej oraz odleżyn. Nadaje się również do leczenia ostrych oparzeń maksymalnie II stopnia.
- W celu pochłaniania wydzieliny z rany należy na opatrunku Atrauman Ag zastosować odpowiedni jałowy opatrunek wtórny (opatrunek chłonny lub superabsorbpcyjny jak np. Zetuvit Plus) zgodnie z jego instrukcją stosowania.
- Opcjonalnie, można zastosować system do terapii podciśnieniowej ran Vivano. Skuteczność opatrunku barierowego utrzymuje się maksymalnie przez siedem dni.
- Opatrunek Atrauman Ag powinien być zmieniany podczas każdej zmiany opatrunku. Czas użycia opatrunku nie powinien przekraczać siedmiu dni.
- W jałowych opakowaniach po 1 sztuce.

### Zmiany opatrunków:

Opatrunek Atrauman Ag może pozostawać na obszarze rany przez okres do około 7 dni.

### Skład maści:

Caprylic/Capric/Myristik/Stearic Triglyceride; Bis-digliceryl Polyacyladipate-2, Macrogol 2000.