

Sutricon CC Plastry Silikonowe na blizny z wit.E 5x30cm, 5 szt.



Cena: 120,74 zł

Opis produktu

Sutricon CC silikonowe plastry z witaminą E na blizny po cesarskim cięciu, 5x30 cm

Wyrób medyczny

Wskazania

Plastry silikonowe na blizny Sutricon CC przeznaczone są do:

- blizn po cesarskim cięciu,
- w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu,
- w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych.

Działanie

Plastry silikonowe Sutricon CC poprawiają wygląd i elastyczność blizn – rozjaśniają, wygładzają i zmniejszają ich widoczność. Dzięki swoim właściwościom zapewniają odpowiedni poziom wilgotności tkanki bliznowatej. Niwelują również dyskomfort związany z tworzącą się blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia. Plastry silikonowe Sutricon CC plastry łączą skuteczność silikonu oraz witaminy E¹. Witamina E stymuluje epitelializację, pozwala utrzymać odpowiednie nawilżenie naskórka oraz zdrowy wygląd skóry.

Zalety produktu

- Są optymalną metodą terapii w miejscu blizny po cesarskim cięciu – mają doskonałe właściwości okluzyjne i nie ścierają się pod ubraniem w przeciwieństwie do stosowanych maści/kremów

- Zabezpieczają przed powstawaniem blizn przerostowych i keloidów
- Zmniejszają widoczność blizny – rozjaśniają ją i wygładzają
- Niwelują uczucie ciągnięcia i swędzenia blizny
- Aplikacja 1 raz dziennie i aktywne działanie 24 godziny
- Zapewniają higienę oraz estetyczny wygląd dzięki możliwości systematycznej zmiany
- Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze

Składniki

Żel silikonowy z witaminą E, elastyczna membrana poliuretanowa.

Sposób użycia i zawartość opakowania

Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon CC na blizny po cesarskim cięciu.

W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażoną na rozciągnięcie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego odklejenie i przemieszczenie.

Przed użyciem dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 – 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster. Długość terapii to średnio:

- min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych
- min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

Opakowanie: 5 plastrów na blizny po cesarskim cięciu 5x30 cm

Środki ostrożności

Plastry Sutricon CC nie mogą być stosowane na:

- Rany otwarte
- Rany sączące
- Oparzenia
- Błony śluzowe