


Test Helicobacter Antygen (kał) * 1 szt.

Cena: 19,96 zł

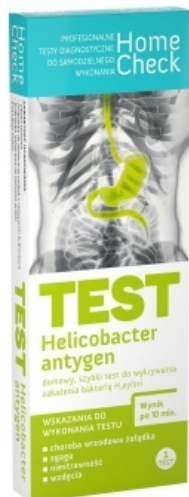

Opis produktu

TEST HELICOBACTER ANTYGEN domowy, kasetkowy test do wykrywania zakażenia bakterią H. pylori

ZASTOSOWANIE TEST HELICOBACTER ANTYGEN

jest domowym szybkim testem przeznaczonym do wykrywania zakażenia bakterią H. pylori, służy do wykrywania antygenów H. pylori w próbce kału. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Naniesione na membranę testu, w procesie produkcji przeciwciała monoklonalne anti – H. pylori, reagują z antygenami bakterii H. pylori, obecnymi w badanym kale. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych linii na membranie kasety testowej w czasie 10 minut.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Test Helicobacter Pylori jest przeznaczony do wykrywania zakażenia bakterią zasiedlającą ludzki żołądek. Test ten służy do określania obecności antygenów Helicobacter pylori w próbce kału. Pozytywny wynik testu wskazuje na obecność antygenów w organizmie. W związku z tym, że bakteria Helicobacter pylori jest główną przyczyną chorób żołądka i dwunastnicy (takich, jak zapalenie błony śluzowej żołądka czy choroba wrzodowa), w przypadku niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego, zaleca się przeprowadzenie testu. Potwierdzenie zakażenia bakterią Helicobacter pylori umożliwi lekarzowi rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU NA HELICOBACTER PYLORI:

- choroba wrzodowa żołądka,
- zgaga,
- niestrawność,
- wzdęcia.

W szybkim wykryciu zakażenia Helicobacter pylori przydatny jest Test HELICOBACTER ANTYGEN, czyli domowy test do sprawdzenia, czy w próbce badanego kału występują antygeny H pylori. Na obecność bakterii Helicobacter w organizmie wskazują konkretne dolegliwości, m.in. nudności, wzdęcia, bóle brzucha po posiłku, zgaga. Gdy przybierają one przewlekły charakter, zaleca się badanie w kierunku zakażenia. Domowa diagnostyka może zostać przeprowadzona o każdej porze, a do badania wystarczy próbka kału.

Helicobacter pylori to mikroaerofilna, gram-ujemna bakteria spiralna, której rezerwuarem jest człowiek. Jest ona główną przyczyną chorób żołądka i dwunastnicy (około 95% wrzodów dwunastnicy i 80% wrzodów żołądka). Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą

pokarmową. W Polsce częstość infekcji H. pylori oceniana jest na 70-80% dorosłej populacji. Zakażenie H. pylori jest przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, choroby wrzodowej oraz raka gruczołowego żołądka i chłoniaka typu MALT. TEST HELICOBACTER ANTYPGEN jest domowym szybkim testem przeznaczonym do wykrywania zakażenia bakterią H. pylori, służy do wykrywania antygenów H. pylori w próbce kału. Zasada działania testu opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Naniesione na membranę testu, w procesie produkcji, przeciwciała monoklonalne anty – H. pylori reagują z antygenami bakterii H. pylori, obecnymi w badanym kale. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych linii na membranie kasety testowej w czasie 10 minut.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 saszetka z testem kasetowym
- 1 pojemnik z odczynnikami oraz aplikatorem do pobierania próbki
- 1 podkładka papierowa do pobrania próbki
- instrukcja użycia